

### **1. Можно ли резать салфетки на нужные размеры?**

- Для придания повязке максимально комфортной формы для покрытия раны повязки можно разрезать в зависимости от конфигурации раны.

P.S. Не забудьте обработать ножницы обеззараживающим средством (например, спиртом).

### **2. Почему вскрытую салфетку необходимо использовать в течение 24 часов?**

- На открытом воздухе нано-частицы серебра окисляются, что приводит к существенному снижению их биохимической активности.

### **3. Что делать, если салфетка прилипла к ране?**

- Прилипание салфетки к гранулирующей ране является хорошим показателем (повязка «врастает»), под ней идет полноценная эпителизация, и после полного восстановления эпидермиса салфетка сама безболезненно отходит.

### **4. Как часто менять салфетку?**

- Салфетку следует оставлять на ране на срок от 2 до 14 дней, в зависимости от количества раневого экссудата и состояния салфетки. Если выделения обильные, то менять по мере наполнения, если рана сухая, то оставлять до полного заживления.

### **5. Почему салфетка внутри пакета сложена?**

- Готовая продукция подвергается стерилизации. При прямом попадании гамма-лучей на участки, покрытые нано-частицами серебра, образуются «пробои» в виде темных пятен. Во избежание данного эффекта салфетку складывают в несколько слоев.

### **6. Какое серебро используется в процессе изготовления?**

- Для напыления на салфетки нано-частиц серебра используется серебро самой высокой пробы 999.9. Слитки серебра закупаются непосредственно в СБЕРбанке.

### **7. Почему салфетки продаются только на маркетплейсах?**

- В нынешней экономической ситуации маркетплейсы являются самым быстрым доступным каналом доставки продукции до конечного потребителя.